

RETELLI LIBERTA TRE

Handleiding





www.retelli.nl



Inhoudsopgave

Algemene instructies	4
Vertrouwd raken uw voertuig	5
Zitcomfort & afstelling	5
Rijvaardigheid bij extreme weersomstandigheden	6
Voor vertrek - controle en voorbereiding	8
Afstandsbediening, sleutels	9
Contactslot en stuurslot	10
Bediening van de rem- en gashendel	11
Bedieningsschakelaars	12
Onderhoud en veiligheid	15
Accu-informatie en onderhoud	17
Oplader en laadinstructies	18
Display en pictogrammen	21
Periodiek onderhoud	22
Garantie en onderhoud	23
Technische parameters	24
Onderhoudsboekje	25

Algemene instructies

Controle vóór gebruik. Om ervoor te zorgen dat het voertuig correct functioneert, voert u vóór elke rit een snelle controle uit:

- Controleer de bandenspanning en de algemene staat van de banden.
- Test of de remmen goed functioneren.

Starten en uitschakelen van het voertuig

- Het voertuig wordt ingeschakeld door de sleutel een kwartslag naar rechts te draaien. Het dashboard licht dan op.
- Om ongewenste acceleratie te voorkomen, draait u de sleutel altijd terug naar links voordat u afstapt of het voertuig onbeheerd achterlaat.

Veiligheid tijdens gebruik

- Zorg ervoor dat de standaard volledig is ingeklapt voordat u aan de gashendel draait.
- Draai nooit aan de gashendel terwijl u het voertuig aan de hand verplaatst. Dit kan leiden tot plotselinge bewegingen en ongelukken.

Gebruik in natte omstandigheden. Het voertuig is geschikt om te rijden bij lichte regen of vochtige omstandigheden, maar:

- Vermijd overmatig watercontact tijdens het reinigen.
- Gebruik geen hogedrukreiniger, om schade aan elektrische componenten te voorkomen. Reinig het voertuig bij voorkeur met een vochtige doek.

Verantwoord rijden


Rijden onder invloed van alcohol of andere verboden middelen is ten strengste verboden. Zelfs een kleine hoeveelheid kan uw reactievermogen verminderen en uw bestuursvaardigheid aantasten.

Vertrouwd raken met uw voertuig

1. U houdt zich aan de verkeersregels en houdt uw rijnsnelheid binnen het veilige limiet.
Let op: de maximale snelheid van dit voertuig is 25 km/h.
2. Voordat u gaat rijden, dient u de handleiding gelezen te hebben voor optimaal gebruik.
3. Zoek een open plek om te oefenen om het voertuig eigen te maken en de essentiële rijeigenschappen van het voertuig volledig te beheersen. Hierdoor zult u vertrouwd raken met gebruik van de Liberta.

Zitcomfort en afstelling

1. Stoelpositie: Gebruik de hendel aan de rechterzijde van de zitting om de stoel naar voren of naar achteren te verstellen. Trek de hendel omhoog en schuif de stoel in de gewenste positie voor een optimaal zitcomfort.
2. Rugleuning: Stel de rugleuning af met de hendel ter hoogte van de rug. Trek de hendel omhoog om de rugleuning rechter te zetten of aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur.
3. Armleuningen: Onder de armleuning bevindt zich een draaiknop waarmee u de hoogte kunt aanpassen. Draai aan de knop om de armleuning omhoog of omlaag te bewegen. Zorg dat uw ellebogen in een hoek van ongeveer 90 graden rusten voor een ergonomische en comfortabele zithouding.

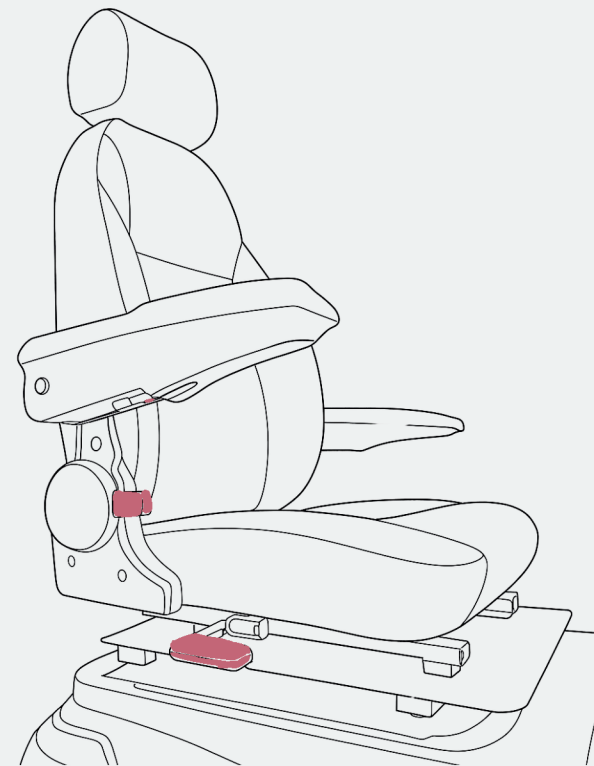

Rijvaardigheid bij extreme weersomstandigheden

Rijden vereist extra aandacht wanneer de weersomstandigheden extreem zijn. Regen, kou, hitte of harde wind kunnen de veiligheid, het rijgedrag en de prestaties van uw voertuig beïnvloeden. Volg onderstaande richtlijnen zorgvuldig op om schade te voorkomen en uw veiligheid te waarborgen.

Rijden bij regen en natte omstandigheden

- Vermijd zware regenval indien mogelijk: De voertuigen zijn spatwaterdicht, maar niet volledig waterdicht. Langdurige blootstelling aan hevige regen kan elektrische componenten beschadigen.
- Rijd trager en met beleid: Natte wegen verminderen de grip. Vermijd plotseling remmen, optrekken of scherpe bochten.
- Gebruik verlichting: Zet uw verlichting aan om beter zichtbaar te blijven voor andere weggebruikers.
- Controleer de remmen: Na het rijden in regen of plassen kunnen remmen tijdelijk minder effectief zijn. Test ze voorzichtig.
- Droog het voertuig na gebruik: Veeg vocht van het display, de bedieningselementen en de accuklep. Laad de accu pas op als deze droog is.

Rijden bij koude, sneeuw of ijs

- Beperk het gebruik: Bij gladheid of sneeuw is het risico op slippen groot. Gebruik de Liberta alleen wanneer het strikt noodzakelijk is.
- Verlaag de snelheid: Rij langzaam en behoud extra afstand tot obstakels of andere weggebruikers.
- Controleer de bandenspanning: Lage temperaturen kunnen de luchtdruk in de banden verminderen, wat invloed heeft op de stabiliteit.

Rijvaardigheid bij extreme weersomstandigheden

- Bescherm de accu: De actieradius van de accu neemt af bij kou. Bewaar en laad de accu op kamertemperatuur wanneer mogelijk.
- Verwijder ijsvorming: Controleer of stuur, remmen en display vrij zijn van ijs of sneeuw voordat u vertrekt.

Rijden bij hitte

- Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht: Hoge temperaturen kunnen het accupakket en elektronische onderdelen beschadigen.
- Laat het voertuig niet langdurig stilstaan in de zon: De behuizing en het zitkussen kunnen heet worden, wat het rijcomfort vermindert.
- Controleer de accu: Hitte kan de levensduur van de accu verkorten. Parkeer bij voorkeur in de schaduw en laad niet op in direct zonlicht.

Rijden bij harde wind

- Houd beide handen stevig aan het stuur: Windvlagen kunnen de stabiliteit beïnvloeden, vooral op open terrein of bruggen.
- Vermijd hoge snelheden: Een lagere snelheid biedt meer controle.
- Blijf alert bij passerend verkeer: Grote voertuigen kunnen plotselinge windverplaatsingen veroorzaken.
- Parkeer veilig: Plaats het voertuig op een vlakke ondergrond.

Rijden bij mist of slechte zichtbaarheid

- Gebruik verlichting en reflectoren: Zorg dat u goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Controleer regelmatig of alle verlichting werkt.
- Rijd langzaam: Pas uw snelheid aan aan de zichtafstand.
- Vermijd groot licht: Helder licht kan reflecteren in mist en uw eigen zicht verminderen.

Voor vertrek - controle en voorbereiding

Voordat u gaat rijden, is het belangrijk om de Liberta zorgvuldig te controleren om veilig gebruik te garanderen en de levensduur van het voertuig te verlengen.

1. Controleer het gehele voertuig op afwijkingen. Controleer visueel of er geen schade, losse onderdelen of ongebruikelijke slijtage aanwezig is. Let in het bijzonder op de banden, verlichting, kabels en de staat van de accu.
2. Zet het contact van de Liberta aan. Controleer of het display en de controlelampjes correct opstarten.
3. Voer een functionele controle uit voordat u vertrekt.
 - Test of alle bedieningselementen correct functioneren.
 - Controleer de werking van de remmen zorgvuldig.
 - Controleer de bandenspanning: deze moet 2,5 bar bedragen voor optimale grip en stabiliteit.

Let op: Rijd nooit weg zonder eerst te controleren of de remmen goed functioneren. Onvoldoende controle kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Afstandsbediening en sleutel


1. Afstandsbediening met alarminstallatie (extra optie)

De afstandsbediening heeft **rechts** bovenaan een open slotje (ontgrendelen) en **links** bovenaan een gesloten slotje (vergrendelen).

Druk op de **rechter** pictogram om het voertuig/slot te ontgrendelen en op het **linker** pictogram om het te vergrendelen.

Druk tweemaal op de **bliksemschicht** om het voertuig te starten zonder de contactsleutel in het contactslot te steken.

Deactiveer de keyless go functie door eenmaal op slotje open te drukken. Druk éénmaal op de **luidspreker** om een signaal af te geven. Per keer geeft het voertuig zevenmaal een geluidssignaal af.

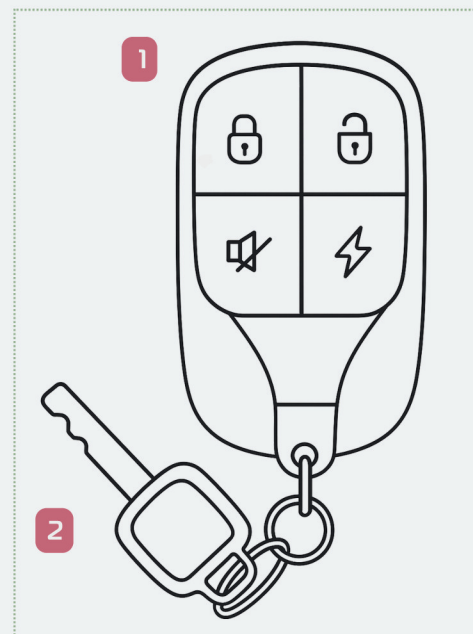

2. Sleutel voor topkoffer, accuruimte en contactslot

Topkoffer openen: Steek de sleutel in het slot van de topkoffer. Draai de sleutel naar links om de topkoffer te openen.

Accuruimte (buddyruimte) openen: Steek de sleutel in het slot aan de achterkant van de buddyruimte. Duw de stoel naar het stuur naar u toe; de zadel klapt open zodat u toegang krijgt tot de accu's. Zorg dat u de buddyruimte goed sluit nadat u klaar bent met de accu-controle. Druk de stoel aan de achterkant goed naar beneden totdat het vastklikt.

Voertuig starten (contactslot): Steek de contactsleutel in het contactslot. Draai de sleutel een kwartslag naar rechts om het voertuig te activeren (dashboard gaat aan). Draai de sleutel een kwartslag naar links en trek hem recht uit om het voertuig te deactiveren.

Op de volgende pagina vindt u een uitgebreide uitleg met illustraties over het contactslot en het stuurslot.

Contactslot & stuurslot

Voertuig activeren / deactiveren

Steek de contactsleutel in het contactslot van de Liberta. Deze bevindt zich aan de rechterkant van het voertuig, onder het stuur.


Draai de sleutel een kwartslag naar rechts om het voertuig te activeren. Het display en de lampen gaan aan. Uw voertuig is klaar om te rijden.

Om het voertuig uit te schakelen draait u de sleutel een kwartslag naar links en trekt u de sleutel er recht uit.

Stuurslot bedienen

Wanneer u de sleutel in het contactslot indrukt en naar links draait, terwijl u het stuur naar links beweegt, vergrendelt het stuurslot.

Om het stuurslot weer te deactiveren, steekt u de sleutel in het contactslot, drukt u deze licht in en draait u de sleutel naar rechts terwijl u het stuur naar rechts beweegt.

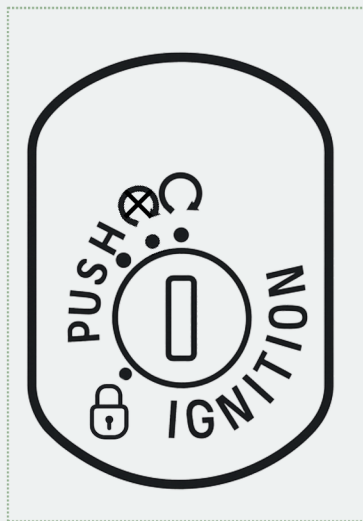

Bediening van de rem- en gashendel

Een correcte bediening van de rem en gashendel is essentieel voor comfortabel en veilig rijden met de Liberta scooter.

Remhendel

Gebruik tijdens het rijden: De remhendel mag tijdens het rijden niet continu worden ingedrukt. Wanneer de rem wordt bediend, wordt de aandrijving automatisch onderbroken. Hierdoor kan de scooter schokkerig aanvoelen of abrupt vertragen.

Aanbevolen remmethode: De meest comfortabele en veilige manier om te remmen is geleidelijk en met lichte druk op de remhendel. Zo behoudt u maximale controle over de scooter en voorkomt u plotselinge bewegingen.

Gashendel

Gebruik bij vertrek: Draai nooit aan de gashendel voordat u goed en stabiel op de Liberta zit. Onjuist gebruik kan leiden tot onverwachte bewegingen van het voertuig.

Controleer de zitpositie: Zorg dat u stevig en rechtop zit met beide handen aan het stuur en beide voeten op de voetenplaat voordat u de gashendel gebruikt.

Let op: Bedien nooit gelijktijdig de gas- en remhendel. Dit kan leiden tot onregelmatig rijgedrag of automatische uitschakeling van de aandrijving. Laat de Liberta altijd volledig tot stilstand komen voordat u de parkeerstand inschakelt.

Bedieningsschakelaars

De Liberta scooter is uitgerust met verschillende schakelaars voor een veilige en comfortabele bediening. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste functies en hun locatie.

1. Hoofdschakelaar

- Functie: De hoofdschakelaar onderbreekt de volledige stroomtoevoer van het voertuig.
- Gebruik: Zet de hoofdschakelaar uit wanneer u de scooter langere tijd niet gebruikt. Hierdoor wordt voorkomen dat de accu langzaam ontladend en beschermt u de elektronische componenten tegen ongewenst energieverbruik.
- Locatie: De hoofdschakelaar bevindt zich in de buddyruimte onder de zitting.

2. Verlichtingsschakelaar

- Functie: De verlichtingsschakelaar regelt de verlichting van de Liberta en bevindt zich aan de rechterzijde van het stuur.
- Schakelstanden:
 - Linkerstand: Alle verlichting aan (dimlicht en achterlicht).
 - Middenstand: Alleen stadsverlichting actief.
 - Rechterstand: Alle verlichting uit.

3. Grootlichtschakelaar

- Functie: De grootlichtschakelaar schakelt tussen grootlicht en dimlicht.
- Gebruik:
 - Zet het grootlicht aan voor extra zicht bij donkere omstandigheden op niet-verlichte wegen.
 - Schakel terug naar dimlicht bij tegenliggers om verblinding te voorkomen.
- Locatie: Deze schakelaar bevindt zich aan de linkerzijde van het stuur.

Bedieningsschakelaars

4. Gashendel en claxonschakelaar

- Gashendel:
 - Versnellen: Draai de gashendel naar u toe om de snelheid te verhogen.
 - Vertragen: Draai de gashendel van u af om te vertragen of de snelheid te verminderen.
- Claxonschakelaar:
 - Bevindt zich aan de linkerkant van het stuur met een grote oranje knop
 - Druk in om de claxon te activeren. Gebruik de claxon uitsluitend om uw aanwezigheid kenbaar te maken in het verkeer.

5. Knipperlichtschakelaar

- Functie: Regelt de richtingaanwijzers voor links- en rechtsaf slaan.
- Gebruik:
 - Schuif de schakelaar naar links om linksaf te slaan.
 - Schuif de schakelaar naar rechts om rechtsaf te slaan.
 - Druk de schakelaar in het midden om het knipperlicht uit te schakelen.
- Locatie: Deze schakelaar bevindt zich aan de linkerkant van het stuur.

Tip: Schakel het knipperlicht direct uit na het afronden van de bocht om verwarring bij andere weggebruikers te voorkomen.

Bedieningsschakelaars

6. Snelheidsstanden

De Liberta beschikt over meerdere snelheidsstanden die eenvoudig via de schakelaar kunnen worden ingesteld.

- Stand 1: Langzaam (+/- 8 km/h)
- Stand 2: Gematigd (+/- 15 km/h)
- Stand 3: Snel (+/- 25 km/h)

**Attentie: Pas uw snelheid altijd aan de verkeerssituatie en ondergrond aan.
Hogere snelheden vragen om langere remweg en controle.**

7. Rijrichtingschakelaar

De rijrichtingschakelaar bepaalt of de Liberta vooruit of achteruit rijdt.

- D (Drive): Vooruit rijden.
- R (Reverse): Achteruit rijden.

Locatie: Deze schakelaar bevindt zich aan de rechterzijde van het stuur.

Belangrijke aanwijzingen:

- Controleer altijd de rijrichting vóór u gas geeft.
- Rijd langzaam en met extra voorzichtigheid bij gebruik van de achteruitstand.
- Sommige modellen geven een waarschuwingssignaal bij het achteruitrijden.

Onderhoud en Veiligheid

Een goed onderhouden Liberta scootmobiel garandeert niet alleen een langere levensduur van het voertuig, maar ook een veilige en comfortabele rijervaring. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste onderhouds- en veiligheidscontroles die regelmatig uitgevoerd moeten worden.

Dagelijkse inspectie: Voer vóór elk gebruik een korte visuele en functionele controle uit om veilig rijden te waarborgen.

Controlepunten:

- Bandenspanning: Controleer of de bandenspanning normaal is. De juiste luchtdruk bedraagt 2,5 bar voor zowel de voorwielen als de achterwielen.
- Bandenconditie: Controleer de banden op scheuren, beschadigingen of abnormale slijtage van het loopvlak. Verwijder eventuele scherpe voorwerpen uit het profiel.
- Remmen: Test de werking van de remmen voordat u vertrekt. De remhendel moet soepel bewegen en het voertuig moet direct vertragen bij bediening.
- Verlichting en richtingaanwijzers: Controleer of alle lampen en signalen goed functioneren.
- Accustatus: Controleer of de accu voldoende is opgeladen voor de geplande rit.

Let op: Onvoldoende bandenspanning kan leiden tot: een kortere actieradius, slechtere wegligging en verhoogde slijtage van de banden.

Onderhoud en Veiligheid

Batterijonderhoud

- Laad de accu altijd volledig op na gebruik, bij voorkeur bij kamertemperatuur.
- Voorkom diepontlading: laat de accu niet langdurig ontladen staan.
- Gebruik alleen de originele oplader die bij de Liberta is geleverd.
- Bewaar de scooter in een droge ruimte om schade door vocht te voorkomen.

Attentie: Extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 35 °C) kunnen de capaciteit en levensduur van de accu nadelig beïnvloeden.

Reiniging en opslag

- Reinig de scooter regelmatig met een vochtige doek.
- Gebruik geen hogedrukreiniger of stromend water; dit kan elektrische componenten beschadigen.
- Droog de scooter na het schoonmaken zorgvuldig af.
- Wanneer u het voertuig langere tijd niet gebruikt:
 - Zet de hoofdschakelaar uit.
 - Laad de accu volledig op en ontkoppel de oplader.
 - Bewaar de scooter op een droge, goed geventileerde plaats.

Veiligheidsaanbevelingen

- Laat onderhoud uitsluitend uitvoeren door een erkende servicepartner.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen om de veiligheid en garantie te behouden.
- Controleer na elk onderhoud de werking van alle bedieningselementen voordat u weer gaat rijden.
- Stel het voertuig buiten gebruik bij afwijkingen of ongebruikelijke geluiden totdat een monteur de oorzaak heeft vastgesteld.

Accu-informatie en onderhoud

De Liberta is uitgerust met een lithiumaccu van hoge kwaliteit. Deze accutechnologie is onderhoudsvrij, betrouwbaar en ontworpen voor langdurig gebruik. De accu vormt het belangrijkste onderdeel van uw scootmobiel – zorgvuldig gebruik en goed onderhoud zijn daarom essentieel voor optimale prestaties en levensduur.

Algemene richtlijnen

1. Behandel de accu met zorg. Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen, vocht en direct zonlicht tijdens het opladen of opslaan.
2. Voorkom diepontlading. Laat de accu niet volledig leeglopen tot het onderspanningslampje gaat knipperen of branden. Dit verkort de levensduur aanzienlijk en kan leiden tot verminderde accucapaciteit.
3. Regelmatig opladen. Maak er een gewoonte van om de accu regelmatig bij te laden, ook wanneer deze nog niet volledig leeg is. Hierdoor blijft de accuspanning stabiel en presteert de Liberta optimaal.

Langdurige opslag

1. Indien de scootmobiel lange tijd niet wordt gebruikt, schakel dan de hoofdschakelaar onder het zadel uit.
2. Laad de accu vervolgens minimaal één keer per drie maanden volledig op om ontleding te voorkomen.
3. Bewaar het voertuig op een droge, vorstvrije plaats.

Let op: Het niet naleven van bovenstaande richtlijnen kan leiden tot onomkeerbare accuschade of verlies van garantie. Gebruik uitsluitend de originele oplader die bij de Liberta is geleverd.

Oplader en laadinstructies

De Liberta is uitgerust met een hoogwaardige lithiumaccu en bijbehorende originele oplader. Correct gebruik van de oplader is essentieel voor een veilige werking en een lange levensduur van zowel de accu als het voertuig.

Veilig gebruik van de oplader

1. Ga zorgvuldig om met de oplader. Plaats de oplader altijd op een stabiele, vlakke ondergrond. Voorkom dat de oplader kan vallen, omgestoten wordt of blootstaat aan schokken.
2. Voorkom contact met water. De oplader is niet waterdicht. Zorg ervoor dat er geen vocht of water in de oplader of de stekkeraansluitingen kan binnendringen.
3. Bedek de oplader niet. Tijdens het opladen kan de oplader warmte afgeven. Bedek deze nooit met doeken, papier of andere voorwerpen, om oververhitting te voorkomen.
4. Gebruik de oplader in een geschikte omgeving.
 - Alleen gebruiken in een droge, schoongehouden en goed geventileerde ruimte.
 - Vermijd direct zonlicht, regen of extreme temperaturen.


Gebruik uitsluitend de originele Liberta oplader die bij het voertuig is geleverd. Onjuiste of beschadigde laders kunnen leiden tot accuschade, oververhitting of brandgevaar. Koppel de oplader altijd eerst aan het voertuig en vervolgens aan het stopcontact. Na het opladen dient u de volgorde omgekeerd te volgen. (eerst stekker uit het stopcontact, dan uit het voertuig).

Oplader en laadinstructies

Het correct aansluiten van de oplader is essentieel voor de levensduur van de accu en voor een veilige werking van uw voertuig. Volg onderstaande stappen zorgvuldig op.

Opladen via de oplaadconnector aan het voertuig:

- 1.** Parkeer het voertuig. Plaats de Liberta op een vlakke, stabiele ondergrond, zet de parkeerstand (P-stand) in en schakel het contact uit.
- 2.** Controleer de oplader en omgeving. Zorg dat de oplader en stekker droog en onbeschadigd zijn. Gebruik de oplader uitsluitend in een goed geventileerde en droge ruimte. Leg de oplader op een stabiele ondergrond waar deze niet kan vallen of worden bedekt.
- 3.** Aansluiten van de oplader. Open de laadpoort aan de voorzijde onder de zitting van de Liberta door op het laadklepje te drukken. Steek de laadstekker van de oplader voorzichtig en volledig in de laadaansluiting van het voertuig. Steek daarna pas de netstekker van de oplader in het stopcontact.
- 4.** Controle tijdens het laden. Controleer of het indicatielampje op de oplader aangeeft dat het laden gestart is (rood lampje). Laat de accu volledig opladen totdat het lampje op de oplader groen brandt.
- 5.** Afkoppelen van de oplader. Trek eerst de netstekker van de oplader uit het stopcontact. Draai daarna de blauwe draaidop een kwartslag naar links terwijl u de stekker uit de laadpoort haalt. Sluit de beschermkap van de laadpoort goed af om vuil en vocht buiten te houden.

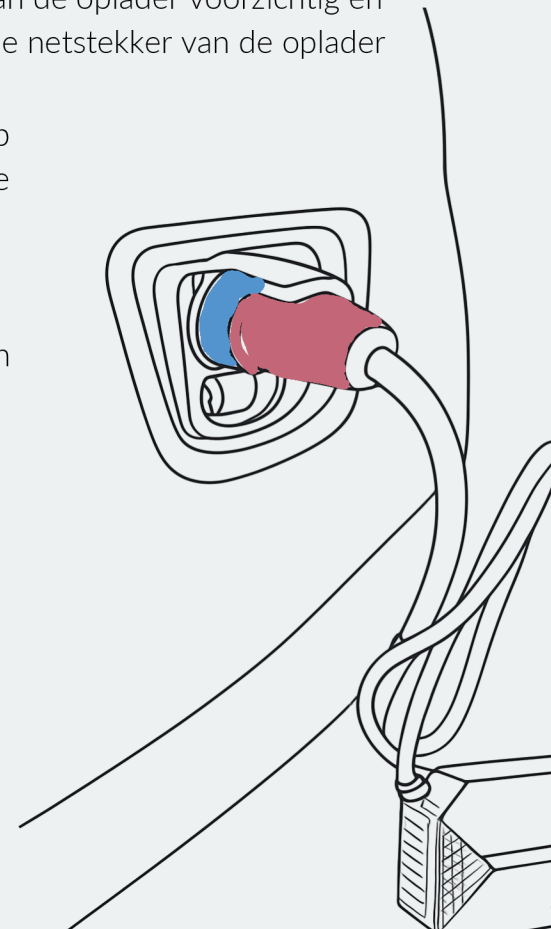

Oplader en laadinstructies


Het correct aansluiten van de oplader is essentieel voor de levensduur van de accu en voor een veilige werking van uw voertuig. Volg onderstaande stappen zorgvuldig op.

Opladen via de oplaadconnector op de accu.

1. Parkeer het voertuig en schakel het contact uit.
2. Open de buddyruimte onder de zitting en pak de accu uit het voertuig. Zorg ervoor dat de accu op een droge en stabiele ondergrond staat.
3. Controleer de oplader en omgeving. Zorg dat de oplader en stekker droog en onbeschadigd zijn. Gebruik de oplader uitsluitend in een goed geventileerde en droge ruimte. Leg de oplader op een stabiele ondergrond waar deze niet kan vallen of worden bedekt.
4. Aansluiten van de oplader. Steek de laadstekker van de oplader voorzichtig in de laadaansluiting van de accu. Steek daarna pas de netstekker van de oplader in het stopcontact.
5. Controle tijdens het laden. Controleer of het indicatielampje op de oplader aangeeft dat het laden gestart is (rood lampje). Laat de accu volledig opladen totdat het lampje groen brandt.
6. Afkoppelen van de oplader. Trek eerst de netstekker van de oplader uit het stopcontact. Draai daarna de blauwe draaidop een kwartslag naar links terwijl u de stekker uit de laadpoort haalt

Display en pictogrammen.

	Knipperlichten.		Aanduiding controllerstoring
	Accuspanning laag, voertuig opladen		Aanduiding motorstoring
READY	Voertuig in rij-stand		Aanduiding gashendelstoring
	Dimlicht / stadslicht.		(Hand)rem aanduiding.
	Grootlicht		Versnellingsindicator
88	Snelheidsmeter weergegeven in km/h	88888	Tripmeter, weergave: kilometeraanduiding
	Diverse rijstanden		Batterij indicator
	Reverse-stand. Achteruit		Drive-stand. Vooruit

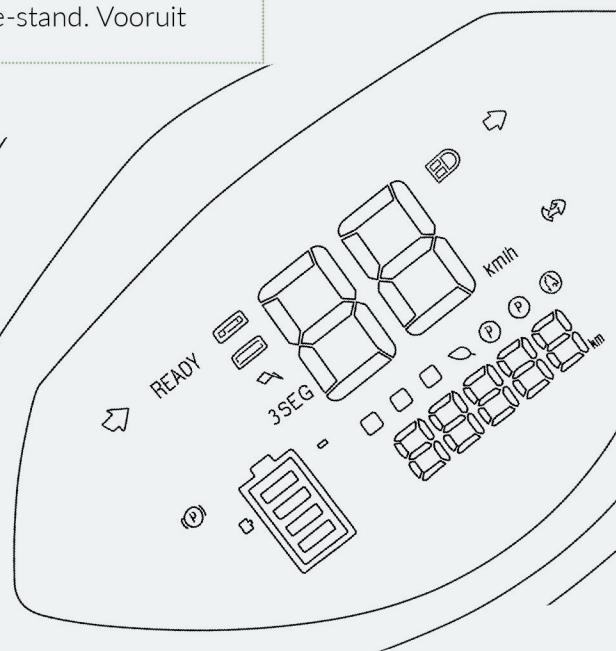

Periodiek onderhoud

Periodiek onderhoud: Naast de dagelijkse controle zijn er periodieke onderhoudsbeurten noodzakelijk om de Liberta in optimale staat te houden.

Onderdeel	Frequentie	Uit te voeren controle / acties
Banden	Wekelijks	Controleer Spanning en slijtage
Remmen	Maandelijks	Controleer werking en remblokken
Accu & laadkabel	Maandelijks	Controleer op schade en corrosie van de aansluitpunten
Verlichting & signalen	Maandelijks	Controleer op de juiste werking
Schroeven en bevestiging	Per kwartaal	Controleer of alle bouten en moeren stevig vastzitten
Algemene inspectie	Per half jaar	Laat een erkend servicepunt het voertuig volledig nakijken

Attentie: Abnormale bandenspanning, scheuren of slijtage kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Gebruik het voertuig niet totdat de oorzaak is verholpen. Laat banden en remmen altijd controleren of vervangen door een erkende servicemonteur.

Garantie en onderhoud

Om aanspraak te blijven maken op de fabrieksgarantie is het belangrijk dat uw Liberta uitsluitend wordt onderhouden door Retelli-erkende servicepunten.

Deze servicepunten beschikken over de juiste kennis om uw voertuig op een veilige en professionele manier te onderhouden. Regelmatig onderhoud zorgt niet alleen voor een langere levensduur van het voertuig, maar ook voor optimale prestaties en veiligheid tijdens het gebruik.

Belangrijk:

- Laat onderhoud, reparaties en inspecties uitsluitend uitvoeren door een erkend Retelli-servicepunt.
- Bewaar altijd de onderhoudsfacturen als bewijs van onderhoud.
- Zelf uitgevoerde reparaties of onderhoud kunnen de garantie ongeldig maken.

Voor een overzicht van erkende servicepunten kunt u terecht op:
www.retelli.nl/verkoop-servicepunten/




☒ DEALERS

☒ SERVICEPUNTEN

Postcode of plaats

Afstandradius

ZOEKEN

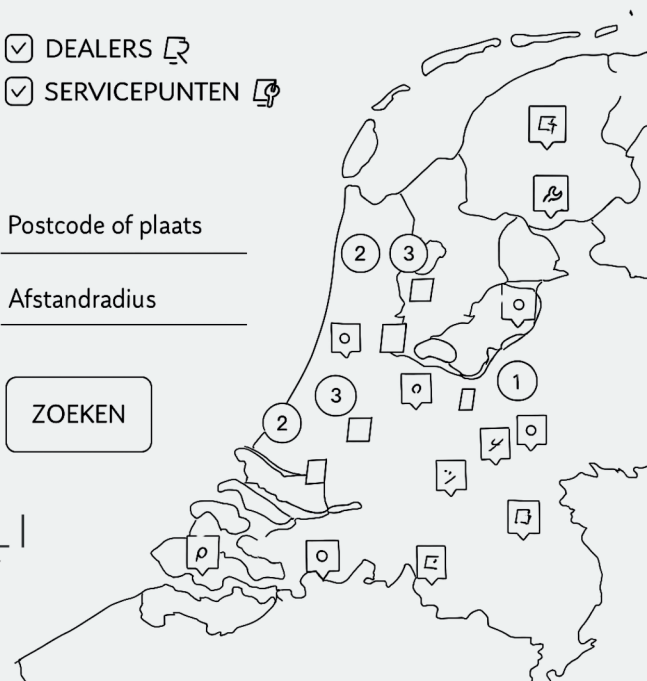

Technische parameters

Eigenschappen, afmeting en gewicht			
Vermogen	1000 watt	Lengte	1600 mm
Standaard accu	60v20ah	Breedte	680 mm
Actieradius bij één accu:	40 á 50 cm	Hoogte incl. stoel	1490 mm
Dubbele accu mogelijk	✓	Afmeting zitvlak (LxB)	430 x 510 mm
Verstelbare stoel	✓	Opstaphoogte	250 mm
Standaard oplader	3A	Zadelhoogte	770 mm
USB	✓	Max. laadgewicht	234 kg
Rear-functie	✓	Breedte stuur	690 mm
Versnellingen	3	Stuurhoogte	1000 mm
Aantal zitplaatsen	1	Gewicht voertuig	100 kg
Uitneembare accu	✓	Gewicht accu	+/- 15 kg
Bandenspanning	2.5 bar	Bandenmaat	3.00 x 10



www.retelli.nl



Onderhoudsboekje

Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde werkzaamheden

Regelmatig onderhoud aan het voertuig is essentieel om veilig en betrouwbaar te kunnen blijven rijden. Daarom is het belangrijk om minstens elke 5.000 kilometer of minimaal één keer per jaar een onderhoudsbeurt uit te laten voeren. Zo blijven alle onderdelen in goede staat, worden problemen tijdig opgespoord en blijft de levensduur van het voertuig optimaal.

Onderdelen vervangen	Opmerkingen	Monteur	Handtekening



www.retelli.nl